

### Crema de uso tópico

Tratamiento de irritaciones y lesiones cutáneas (heridas agudas y crónicas)

#### Descripción del producto

---

Furaderm es una crema de aplicación tópica que contiene como componente principal el ácido hialurónico hidrolizado, que se obtiene a partir de un sustrato vegetal.

El ácido hialurónico es un constituyente natural de la matriz extracelular de los tejidos corporales. Debido a sus propiedades hidrofílicas, actúa como soporte estructural y confiere tonicidad y elasticidad a los tejidos, ya que proporciona un medio hidratado entre las células, facilitando su migración.

Favorece el mantenimiento de un entorno húmedo en la herida, promoviendo y acelerando el proceso de reepitelialización y reparación de los tejidos.

#### Ingredientes

---

Monoestearato de glicerol, estearato de polietilenglicol, lauroil macrogol glicéridos, propilenglicol dicaprilocaprato, propilenglicol, ácido hialurónico hidrolizado, fenoxietanol, ácido benzóico, ácido dehidroacético, hidróxido sódico y agua purificada.

#### Indicaciones

---

- Tratamiento de irritaciones y lesiones cutáneas (heridas agudas y crónicas):
- Abrasiones, cortes superficiales, arañazos
  - Cicatrices hipertróficas, queloides y sequedad por radioterapia
  - Zonas en las que se ha extirpado tejido para realizar un injerto
  - Heridas resultantes de intervenciones quirúrgicas
  - Quemaduras de primer y segundo grado
  - Úlceras vasculares y metabólicas
  - Úlceras por presión

#### Posología y modo de empleo

---

Lavarse las manos antes y después de su utilización.  
Limpiar y desinfectar la herida antes de utilizar Furaderm.  
Aplicar una fina capa de crema sobre la piel dañada dos o más veces al día. Proteger la herida con una gasa estéril en caso necesario.

## Contraindicaciones

---

No administrar a pacientes con hipersensibilidad conocida a alguno de los componentes del producto.

## Advertencias y precauciones

---

No utilizar el producto después de la fecha de caducidad que figura en el envase. Mantener el producto fuera de la vista y del alcance de los niños.

En caso de contacto con los ojos, lavar bien con agua.

En caso de señal manifiesta de infección, consultar al médico.

Cada tubo de Furaderm debe ser usado únicamente por un paciente con el fin de reducir el riesgo de infección cruzada.

Cuidemos el medio ambiente. No tire el envase a la basura, colabore a su reciclado depositándolo en el Punto SIGRE de la farmacia.

## Reacciones adversas

---

En los tratamientos prolongados pueden producirse ocasionalmente reacciones cutáneas como erupción en el lugar de aplicación, picor, ardor o irritación.

## Conservación

---

Mantener el tubo bien cerrado, alejado de fuentes de calor directo.

## Presentaciones

---

Tubos con 30 y 100 g de crema.

Última revisión del texto: septiembre 2018



Seid, S.A.

Ctra. de Sabadell a Granollers, Km 15.  
08185 Lliçà de Vall, Barcelona (España)



Fabricante



Consultar instrucciones de utilización.



No utilizar si el envase está dañado.



Mantener alejado de la luz solar.

Producto sanitario

